


ActiPatch®

För ett aktivt liv med
mindre smärta och
färre mediciner



Muskel- & ledsmärtor

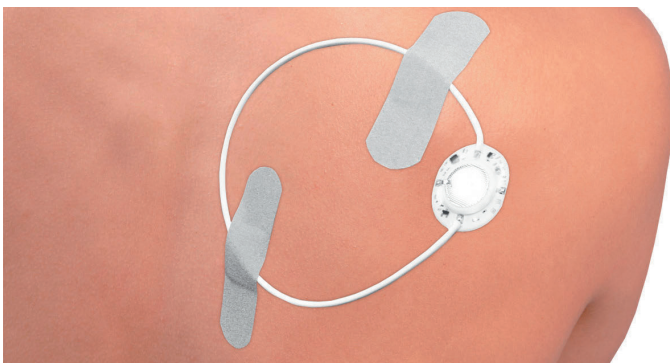

ActiPatch® – Muskel- och ledsmärta ger avancerad långtidsverkande smärtlindring med hjälp av elektromagnetisk pulsterapi.

- Antiinflammatorisk effekt
- På/av-funktion med 720 timmars batteritid
- Kan appliceras på olika ställen.
- Kliniskt beprövad

ActiPatch® Muskel- och ledsmärta ger långtidsverkande smärtlindring med hjälp av elektromagnetisk pulsterapi. ActiPatch® har kliniskt bevisad smärt- och inflammationshämmande effekt på problemområdet och är upp till fem gånger bättre än traditionella värktabletter.


Behandlingen passar utmärkt för smärtor och ömhet/stelhet i muskler, sträckningar, stukningar, nacke/skuldror, höfter, karpaltunnelsyndrom, fibromyalgi, artrit, postoperativ återhämtning och mycket mer.

ActiPatch® innehåller inga läkemedel eller tillsatser, vilket gör den säker för kontinuerligt bruk. Den kan användas tillsammans med vilken medicin som helst. Säker för diabetiker, reumatiker, personer med pacemaker/metallimplantat, sängbundna och äldre.

Till skillnad från en TENS-apparat, kommer du inte att känna av värme eller vibrationer. Du kommer faktiskt inte att känna av ActiPatch® alls – det enda du kommer att uppleva är en förbättring!

När den gröna lampan lyser är enheten aktiv.

Aktivt område som behandlas.

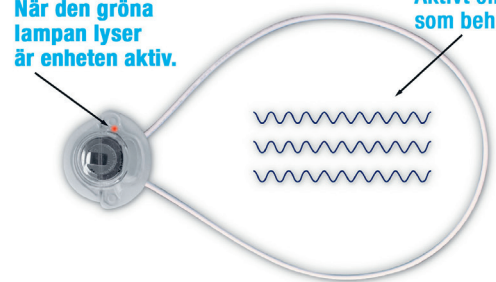

Tekniska specifikationer

Bärvågsfrekvens:	27,12 MHz
Max effekt:	94 mikrowatt
Pulsfrekvens:	1000 pulser/sekund
Puls längd:	100 mikrosekunder
Energikälla:	Batteri
Antennstorlek:	12 cm
Behandlingsområde:	100 cm ² av 70 cm ²
Vikt:	8 gram
Drifttid:	720 timmar med av/på-funktion

Vad ingår?

En ActiPatch® 720-timmars enhet samt självhäftande tejp för 30 dagar

Användande

Placera cirkeln direkt över ursprunget till smärtan. Det terapeutiska området är inom slingan. Det spelar ingen roll åt vilket håll du sätter enheten. Använd den medsända tejp eller någon annan metod du tycker känns bekväm. För maximal smärtlindring, bör enheten användas på ett område i taget tills smärtan minskar. ActiPatch® kan enkelt integreras i dina vardagsrutiner och du kan röra dig obehindrat.

swedish
HealthCare

För mer information eller köp av ActiPatch®:

www.actipatch.se